

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cytopathologie

Liquide Céphalo-Rachidien (LCR)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Caractérisation cytologique et/ou de recherche de cellules malignes dans un liquide céphalo-rachidien (LCR)

Attention: la numération, répartition cellulaire et l'hématocrite sont effectuées par le laboratoire LCH, pour cela remplir la prescription « LCR numération et différenciation leucocytaire »

**Remarques :** la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisions sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie :

[iup.secretariat@chuv.ch](mailto:iup.secretariat@chuv.ch).

#### Renseignement téléphonique

021 31 47 145

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

NON

#### Spécialité

- Anato-mo-histo-cyto-pathologie

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

##### Lien

[100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique](#)

##### Lien

[100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique](#)

#### Renseignements à fournir

##### Obligatoires :

Nom Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats - Volume de LCR ajouté au CytoLyt®

#### Recommandations

Pas de prise en charge en urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire prestataire.

Attention : ne pas utiliser ce formulaire si « numération répartition



cellulaire et l'hématocrite» sont demandés sur du LCR, car ces analyses sont effectuées par le laboratoire LCH, pour cela remplir la prescription « LCR numération et différenciation leucocytaire »

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

#### Instruction(s) particulière(s)

Mettre 2 ml de LCR dans un tube de 15ml CytoLyt® à bouchon vert pour envoi au laboratoire Cytologique de l'IPA  
Attention: si une numération, répartition cellulaire et l'hématocrite sont demandées : ne pas mettre la totalité du LCR natif dans le tube CytoLyt®:  
Mettre 2 ml de LCR natif dans le CytoLyt® pour la Cytologie et le volume restant est envoyé natif aux autres labo concernés

### Matériel standard

#### Contenant

Tube CytoLyt



Sur demande au tél 66 295

### Stabilité maximale avant analyse

#### Ambiant

3 semaines

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

Maintenir à température ambiante jusqu'à l'acheminement à l'IPA

#### Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA

#### Dépose des prélèvements

Institut de Pathologie / Réception Cytopathologie

#### Site

BU25-03-212

#### Adresse

CHUV-Institut de Pathologie  
Laboratoire de cytopathologie  
Rue du Bugnon 25  
1011 Lausanne

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé



**Téléphone** 021 31 47 324

---

**Site web** [Pathologie - Réception/Cytopathologie](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Institut de Pathologie / Laboratoire de Cytopathologie

---

**Site** IPA/BU25

---

**Adresse** CHUV-Institut de Pathologie  
Service de Pathologie Clinique  
Rue du Bugnon 25  
1011 Lausanne

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

---

**Téléphone** 021 31 47 111

---

**Astreinte** Pathologie Cytopathologie

### Résultats

**Interprétation** Par un pathologiste de l'IPA