Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytopathologie

Liquide d'épanchement (pleural, ascite, péricardique) - Rinçage abdominal - Lavage vésical, urine



Informations générales

Examen

CXUIICII	
But de l'analyse	Caractérisation cytologique et/ou de recherche de cellules malignes sur un épanchement (pleural, ascite, péricardique), un rinçage abdominal, lavage vésical ou urine Remarques: la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisons sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie: iup.secretariat@chuv.ch.
Renseignement téléphonique	021 31 47 145
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Anatomo-histo-cyto-pathologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien 100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique Lien 100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique
Renseignements à fournir	Obligatoires : Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats
Recommandations	Pas de prise en charge en urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire. La numération répartition cellulaire et l'hématocrite sont effectuées au LCH (cf. Fiche liquide d'ascite numération et différentiation leucocytaire)



Pré analytique

Prélèvement

Nature

• Liquide épanchement, rinçage abdominal, lavage vésical, urine

Instruction(s) particulière(s)

Liquide d'épanchement, rinçage abdominal

- Minimum 100ml (maximum 250ml)
- Ajouter 0,5ml héparine pour 100ml de liquide
- Ne pas ajouter ni d'alcool, ni autre fixateur

Urine

- Ne pas envoyer la première miction de la journée
- Pas de collecte d'urine sur 24 heures
- Ajouter quelques gouttes de désinfectant incolore (Peau) et conservation à +4°C jusqu'à envoi au laboratoire

Matériel standard

Contenant

Bouteille plastique col large 250 ml



N° commande: 500306

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	Maintenir réfrigéré jusqu'à l'acheminement à l'IPA
Conditions d'acheminement	A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologique de l'IPA
Acheminement	
Conditions d'acheminement	A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA
Dépose des prélèvements	Institut de Pathologie / Réception Cytopathologie
Site	BU25-03-212



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
	Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Laboratoire de cytopathologie

Horaire d'ouverture de la réception Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 47 324

Site web Pathologie - Réception/Cytopathologie

Analytique

Prestataire

Prestataire	Institut de Pathologie / Laboratoire de Cytopathologie
Site	IPA/BU25
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Service de Pathologie Clinique Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 111
Astreinte	Pathologie Cytopathologie

Résultats

Interprétation Par un pathologiste de l'IPA

