



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cytopathologie

Cyponction d'organe solide ou de collection liquidienne

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Caractérisation cytologique et/ou de recherche de cellules malignes dans une cytoponction d'organe solide (organe profond ou lésion superficielle) ou de collection liquide

**Remarques :** la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologue. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisions sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie : [iup.secretariat@chuv.ch](mailto:iup.secretariat@chuv.ch).

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 47 145

---

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

---

#### Analyse accréditée

NON

---

#### Spécialité

- Anatomo-histo-cyto-pathologie

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique](#)

Lien

[100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique](#)

---

#### Renseignements à fournir

**Obligatoires :**

Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats

---

#### Recommendations

Pas de prise en charge en urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Cytoponction d'organe solide ou collection liquidienne

#### Instruction(s) particulière(s)

1. Cytoponction d'organe solide
  - a) Frottis : fixer immédiatement à l'aide d'un cytospray (fourni sur demande par l'IPA)
  - b) Puis, dans tous les cas, ne pas oublier de rincer l'aiguille dans le pot contenant 20ml de NaCl à 0,9%
2. Collection liquidienne  
Envoi du liquide natif dans le pot

### Matériel standard

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

72h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

Maintenir réfrigéré jusqu'à l'acheminement à l'IPA

#### Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologique de l'IPA

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA

#### Dépose des prélèvements

Institut de Pathologie / Réception Cytopathologie



**Site** BU25-03-212

**Adresse** CHUV-Institut de Pathologie  
Laboratoire de cytopathologie  
Rue du Bugnon 25  
1011 Lausanne

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 47 324

**Site web** [Pathologie – Réception/Cytopathologie](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Institut de Pathologie / Laboratoire de Cytopathologie

**Site** IPA/BU25

**Adresse** CHUV-Institut de Pathologie  
Service de Pathologie Clinique  
Rue du Bugnon 25  
1011 Lausanne

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 47 111

**Astreinte** Pathologie Cytopathologie

### Résultats

**Interprétation** Par un pathologiste de l'IPA