Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Anticorps anti-MPO**

## Informations générales

#### Examen

| Renseignement téléphonique | 021 31 40 805   |
|----------------------------|---|
| Horaire de réalisation     | Heures ouvrables du laboratoire                           |
| Fréquence d'exécution      | 1x/jour   |
| Analyse accréditée         | OUI   |
| Spécialité                 | • Auto-immunité   |
| Synonyme                   | Anticorps anti-myéloperoxydase                            |
| Prescription               |   |
| Formulaire de demande      | Numéro de commande<br>999073<br>Lien<br>050 - Immunologie |



### Pré analytique

**Prélèvement** 

· Sang veineux **Nature** 

Matériel standard

1 **Quantité** 

Tube 7.5 ml sérum gel Contenant

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres

analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

Matériel pédiatrique

1 Quantité

Tube 1.2 ml sérum **Contenant** 



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Stabilité maximale avant envoi

Nuit et we Réfrigéré

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, **Préparation** vol minimum 0.6 ml 4°C **Conservation** à T° ambiante **Conditions d'acheminement Acheminement** Réception des laboratoires Dépose des prélèvements

BH18-100



Site

| Adresse                             | Bugnon 46<br>1011 Lausanne   |
|-------------------------------------|--|
| Pneumatique                         | 439  |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30<br>Samedi : 6h30-15h30<br>Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00  |
| Téléphone                           | 021 31 44 280  |
| Astreinte                           | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web                            | <u>Réception des laboratoires</u>  |

### **Analytique**

#### **Prestataire**

| Prestataire                        | Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie                          |
|------------------------------------|--|
| Site                               | BH18-100   |
| Adresse                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne  |
| Tube pneumatique                   | 439  |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| Téléphone                          | 021 31 40 805  |
| Site web                           | <u>Immunologie et allergie</u>   |
| Résultats                          |  |
| Délai de rendu                     | 2-3 jours  |
| Méthode analytique                 |  |
| Principe de la méthode             | • ECL  |



### Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

**Tarif** 

Tarif (CHF)

**Condition(s) spéciale(s)**Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires.

