

Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-cellules pariétales gastriques et facteur intrinsèques

Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Indication diagnostique | Anémie de Biermer |
| Renseignement téléphonique | 021 31 40 805 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/jour |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none">• Auto-immunité |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 741030 Lien 050 - Immunologie |

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml sérum



Monovette bouchon blanc - N° commande : 734811

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 40 805

Site web[Immunologie et allergie](#)**Résultats****Délai de rendu**

1 semaine

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Immunodot



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 66.6