



Catalogue des analyses - Laboratoire

Hépatite B

Sérologie, anti-HBc IgM

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Suivi hépatite B
Indication diagnostique	Hépatites aiguës, hépatites chroniques
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Virologie
Synonyme	HBV
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 741030 Lien 050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages
hépatites-HIV

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 510299

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,
vol minimum 2.0 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique Immunologie et allergie

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Astreinte 021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV

Site web [Immunologie et allergie - HIV](#)

Résultats

Délai de rendu < 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECL

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 20.7

Condition(s) spéciale(s) Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires