

Catalogue des analyses - Laboratoire

Dépistage hépatites aiguës

Sérologie

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche des marqueurs suivants : antigène HBs, anticorps anti-HBc totaux, anticorps anti-HAV IgM, anticorps anti-HCV, anticorps anti-HEV IgM, anticorps anti-HEV IgG

Indication diagnostique

Hépatites aiguës

Renseignement téléphonique

021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Virologie

Synonyme

Hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite E, HAV, HBV, HCV, HEV

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999073

Lien

[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépatites-

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,
vol minimum 2.0 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	Immunologie et allergie
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Astreinte	021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV
Site web	Immunologie et allergie - HIV

Résultats

Délai de rendu < 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECL

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 131.5

Condition(s) spéciale(s) Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires