

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hépatite B

Sérologie, antigène HBs

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dépistage et suivi hépatite B
Indication diagnostique	Hépatites aiguës, hépatites chroniques
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Virologie
Synonyme	HBV
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement	
Nature	<ul style="list-style-type: none">• Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépatites-

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,
vol minimum 2.0 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	Immunologie et allergie
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Astreinte	021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV
Site web	Immunologie et allergie - HIV

Résultats

Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">ECL

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	1 an
-------------------------	------

Tarif

Tarif (CHF)	15.7
--------------------	------

Condition(s) spéciale(s)	Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires
---------------------------------	--