Catalogue des analyses - Laboratoire DLA_INV_01_00357 V16 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hépatite B

Sérologie, anti-HBc totaux



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dépistage et suivi hépatite B
Indication diagnostique	Hépatites aigues, hépatites chroniques
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Virologie
Synonyme	HBV
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)f: biotine (>5 mg/jour, prélèvement au moins 8 heures après dernière


prise).

1

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K

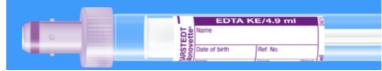

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépat

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel néonatologie

Quantité

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 998995

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes



Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2.0 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	Immunologie et allergie
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Astreinte	021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites-HIV
Site web	<u>Immunologie et allergie - HIV</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ECL
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	6 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	13.7
Condition(s) spéciale(s)	Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires

