



Catalogue des analyses - Laboratoire

Hépatite B

Sérologie, anti-HBc totaux



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dépistage et suivi hépatite B
Indication diagnostique	Hépatites aiguës, hépatites chroniques
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Virologie
Synonyme	HBV
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

f: biotine (>5 mg/jour, prélèvement au moins 8 heures après dernière prise).

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépatites-

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes



Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2.0 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique Immunologie et allergie

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Astreinte 021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV

Site web [Immunologie et allergie - HIV](#)

Résultats

Délai de rendu < 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECL

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 13.7

Condition(s) spéciale(s) Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires