Catalogue des analyses - Laboratoire

# **HIV-1/-2**

Sérologie

## Informations générales

	-	_	-
CXd	m	е	n

But de l'analyse	Dépistage infection HIV-1/-2
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Virologie
Synonyme	VIH, dépistage HIV, antigène HIV 1 P24, HIVDUO
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie

## Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 7.5 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

## Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépat

### Matériel pédiatrique

Quantité

1

1

Tube 2.6 ml EDTA-K **Contenant** 



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

### Matériel néonatologie

Quantité

Tube 1.2 ml EDTA-K **Contenant** 



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 998995

### Stabilité maximale avant envoi

Nuit et we Réfrigéré

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le plasma/sérum, vol minimum 2.0 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



# **Analytique**

## **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	Immunologie et allergie
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Astreinte	021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites-HIV
Site web	<u>Immunologie et allergie - HIV</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ECL
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	6 mois
Tarif	

44.1

Immunodot)



Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)

Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires (PCR et/ou