

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# HIV-1/-2

Sérologie

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Dépistage infection HIV-1/-2
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Virologie</li></ul>
<b>Synonyme</b>	VIH, dépistage HIV, antigène HIV 1 P24, HIVDUO
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999073 <b>Lien</b> <a href="#">050 - Immunologie</a>

## Pré analytique

<b>Prélèvement</b>	
<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sang veineux</li></ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépatites-

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Matériel néonatalogie**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Nuit et we

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le plasma/sérum, vol minimum 2.0 ml

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires



<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	Immunologie et allergie
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
<b>Astreinte</b>	021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV
<b>Site web</b>	<a href="#">Immunologie et allergie - HIV</a>

### Résultats

**Délai de rendu** < 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • ECL

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 44.1

**Condition(s) spéciale(s)** Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires (PCR et/ou Immunodot)