



Catalogue des analyses - Laboratoire

Facteur Bb

Information(s) importante(s)

Attention

Acheminer immédiatement le tube sur la glace

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Immunologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

741030

Lien

[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 906196

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble du bilan du complément se réalisant sur plasma EDTA

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 510299

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger, au maximum 2 heures après prélèvement, durant 10 min à 2000 g, décanter le plasma, vol minimum 2x 0.6 ml et congeler immédiatement

Conservation

Congeler immédiatement

Conditions d'acheminement

Envoi congelé

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminement immédiat sur glace. Arrivée au laboratoire à 16h00 au plus tard

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 40 805

Site web[Immunologie et allergie](#)**Résultats****Délai de rendu**

1 semaine

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- ELISA



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 57.6