Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Facteur Bb**

## Information(s) importante(s)

**Attention** 

• Acheminer immédiatement le tube sur la glace

# Informations générales

**Examen** 

Renseignement téléphonique 021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée OUI

• Immunologie

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

999073

Lien

<u>050 - Immunologie</u>

# Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang veineux

**Matériel standard** 

**Quantité** 

### Contenant Tube 7.5 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

# Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble du bilan du complémen EDTA

#### Matériel pédiatrique

**Quantité** 

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger, au maximum 2 heures après prélèvement, durant 10 min à 2000 g, décanter le plasma, vol minimum 2x 0.6 ml et congeler immédiatement
Conservation	Congeler immédiatement
Conditions d'acheminement	Envoi congelé
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Acheminement immédiat sur glace. Arrivée au laboratoire à 16h00 au plus tard
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH



Site web Réception des laboratoires

**Analytique** 

**Prestataire** 

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46

1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8hoo à 17hoo

Samadi, dimanche et journ fériée : form

Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

Site web <u>Immunologie et allergie</u>

Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 57.6

