Catalogue des analyses - Laboratoire

AP-50

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien

<u>050 - Immunologie</u>

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel
	Employed Set 4 to 1 t
	Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble du bilan du complément se réalisant sur du sérum


Matériel pédiatrique

Quantité ¹

Contenant Tube 1.2 ml sérum





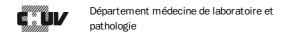

S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger, au maximum 2 heures après prélèvement, durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2x 0.6 ml et congeler immédiatement
Conservation	-20°C
Conditions d'acheminement	Envoi congelé
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Acheminement immédiat sur glace. Arrivée au laboratoire à 16h00 au plus tard
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 40.5

