Catalogue des analyses - Laboratoire

CH-50

Information(s) importante(s)

Attention

• Acheminer immédiatement le tube sur la glace

Informations générales

Examen

| But de l'analyse | En cas de suivi de traitement à l'Eculizumab : ajouter le SC5b-9 (EDTA) |
|----------------------------|---|
| Renseignement téléphonique | 021 31 40 805 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | Immunologie |
| Synonyme | CH50 |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie |

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité ¹

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel





Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant

Tube 1.2 ml sérum

Serum Z/1.2 ml

S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble du bilan du complément se sur du sérum

Traitement du prélèvement pour requérants externes

| Préparation | Centrifuger, au maximum 2 heures après prélèvement, durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2x 0.6 ml et congeler immédiatement |
|-------------------------------------|--|
| Conservation | Congeler immédiatement |
| Conditions d'acheminement | Envoi congelé |
| Acheminement | |
| Conditions d'acheminement | Acheminement immédiat sur glace. Arrivée au laboratoire à 16h00 au plus tard |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |



Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web <u>Immunologie et allergie</u>

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 32.4

