

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# CH-50

## Information(s) importante(s)

**Attention**

Acheminer immédiatement le tube sur la glace

## Informations générales

**Examen****But de l'analyse**

En cas de suivi de traitement à l'Eculizumab : ajouter le SC5b-9 (EDTA)

**Renseignement téléphonique**

021 31 40 805

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/semaine

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Immunologie

**Synonyme**

CH50

**Prescription****Formulaire de demande**

Numéro de commande

999073

Lien

[050 - Immunologie](#)

## Pré analytique

**Prélèvement****Nature**

- Sang veineux

**Matériel standard****Quantité**

1

**Contenant**

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble du bilan du complément se sur du sérum

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Centrifuger, au maximum 2 heures après prélèvement, durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2x 0.6 ml et congeler immédiatement

### Conservation

Congeler immédiatement

### Conditions d'acheminement

Envoi congelé

## Acheminement

### Conditions d'acheminement

Acheminement immédiat sur glace.  
Arrivée au laboratoire à 16h00 au plus tard

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Site web** [Immunologie et allergie](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • ELISA

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 32.4