

Catalogue des analyses - Laboratoire

CH-50

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube sur la glace

Informations générales

Examen**But de l'analyse**

En cas de suivi de traitement à l'Eculizumab : ajouter le SC5b-9 (EDTA)

Renseignement téléphonique

021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Immunologie

Synonyme

CH50

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

999073

Lien[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Prélèvement**Nature**

- Sang veineux

Matériel standard**Quantité**

1


Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

| | |
|---|---|
| Quantité | 1 |
| Contenant | <p>Tube 1.2 ml sérum</p>  <p>S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994</p> |
| Règle(s) si cumul avec d'autres analyses | Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble du bilan du complément se du sérum |
| Traitement du prélèvement pour requérants externes | |
| Préparation | Centrifuger, au maximum 2 heures après prélèvement, durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2x 0.6 ml et congeler immédiatement |
| Conservation | Congeler immédiatement |
| Conditions d'acheminement | Envoi congelé |
| Acheminement | |
| Conditions d'acheminement | Acheminement immédiat sur glace. Arrivée au laboratoire à 16h00 au plus tard |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 32.4