

Catalogue des analyses - Laboratoire

SC5B-9

Informations générales

Examen

But de l'analyse

En cas de suivi traitement à l'Eculizumab : ajouter le CH 50 (sérum)

Renseignement téléphonique

021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999073

Lien

[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger, au maximum 2 heures après prélèvement, durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2x 0.6 ml et congeler immédiatement

Conservation

Congeler immédiatement

Conditions d'acheminement

Envoi congelé

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminement immédiat sur glace.
Arrivée au laboratoire à 16h00 au plus tard

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>

Résultats

Délai de rendu	1 semaine
-----------------------	-----------

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	6 mois
-------------------------	--------

Tarif

Tarif (CHF)	32.4
--------------------	------