



Catalogue des analyses - Laboratoire

HIV-1/-2

Confirmation

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Confirmation infection HIV-1/-2. Les analyses réalisées dépendent des résultats antérieurs.

Renseignement téléphonique

021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Virologie

Synonyme

HIV

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

741030

Lien

[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 906196

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si acheminement impossible dans les 24 heures post-prélèvement
Centrifuger durant 15 min à 1000g
Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml

Conservation

L'échantillon à 4°C
le plasma à -20°C

Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante
le plasma congelé

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique Immunologie et allergie

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Astreinte 021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV

Site web [Immunologie et allergie - HIV](#)

Résultats

Délai de rendu < 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode • Immunodot

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 59.4