

Catalogue des analyses - Laboratoire

HIV-1/-2

Confirmation

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Confirmation infection HIV-1/-2. Les analyses réalisées dépendent des résultats antérieurs.

Renseignement téléphonique

021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Virologie

Synonyme

HIV

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande**

999073

Lien[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Prélèvement**Nature**

- Sang veineux

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si acheminement impossible dans les 24 heures post-prélèvement
Centrifuger durant 15 min à 1000g
Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml

Conservation

L'échantillon à 4°C
le plasma à -20°C

Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante
le plasma congelé

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	Immunologie et allergie
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Astreinte	021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV
Site web	Immunologie et allergie - HIV

Résultats

Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Immunodot

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	6 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	59.4
Condition(s) spéciale(s)	Un test négatif peut engendrer des coûts supplémentaires (PCR)