Catalogue des analyses - Laboratoire

Etanercept

Taux résiduel du médicament

Informations générales

Exa	m	ρ	n
CAU		•	

Renseignement téléphonique

Horaire de réalisation

Fréquence d'exécution

Analyse accréditée

Synonyme

Suivi thérapeutique

021 31 40 805

Heures ouvrables du laboratoire

2x/mois

OUI

Enbrel, médicaments, biologiques

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

955611 **Lien**

<u>052 - Immunologie - Médicaments biologiques</u>

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Security Street

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 1.0 ml
Conservation	48 heures congélateur
Conditions d'acheminement	48 heures congelé
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie
Résultats	

1-2 semaines

Post analytique

Délai de rendu

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 78.3

