

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Infliximab

Taux résiduel du médicament


## Informations générales

### Examen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>But de l'analyse</b>           | Suivi thérapeutique   |
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 40 805   |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | Heures ouvrables du laboratoire   |
| <b>Fréquence d'exécution</b>      | 1x/semaine  |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI   |
| <b>Synonyme</b>                   | Remicade, Inflectra, médicaments biologiques  |
| <b>Prescription</b>               |   |
| <b>Formulaire de demande</b>      | <b>Numéro de commande</b><br>955611<br><b>Lien</b><br><a href="#">052 - Immunologie - Médicaments biologiques</a> |

## Pré analytique

### Matériel standard

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Quantité</b>  | 1  |
| <b>Contenant</b> | Tube 7.5 ml sérum gel<br><br>Monovette bouchon brun - N° commande : 732677 |

### Matériel pédiatrique

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>Quantité</b>  | 1                          |
| <b>Contenant</b> | Tube 4.9 ml sérum sans gel |



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

## Stabilité maximale avant envoi

### Réfrigéré

Nuit et we

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,  
vol minimum 1.0 ml

### Conservation

48 heures à 4°C

### Conditions d'acheminement

Température ambiante

### Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

|   |  |
|---|--|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie                          |
| <b>Site</b>                               | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne  |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 40 805  |
| <b>Site web</b>                           | <u><a href="#">Immunologie et allergie</a></u>                               |

### Résultats

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Délai de rendu</b> | 1 semaine |
|-----------------------|-----------|

## Post analytique

### Conservation après examens

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Aliquote congelé</b> | 6 mois |
|-------------------------|--------|

### Tarif

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Tarif (CHF)</b> | 78.3 |
|--------------------|------|