

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# HTLV 1-2

Sérologie

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Dépistage HTLV 1-2
<b>Indication diagnostique</b>	Donneur d'organes, leucémie T, paraparésie spastique
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	2x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Virologie</li></ul>
<b>Synonyme</b>	Virus T-lymphotropique humain
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999073 <b>Lien</b> <a href="#">050 - Immunologie</a>

## Pré analytique

<b>Prélèvement</b>	
<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sang veineux</li></ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépatites-

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré**

Nuit et we

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,  
vol minimum 2.0 ml

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaires d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Site web** [Immunologie et allergie](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • ECL



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé**

6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)**

26.1

---

**Condition(s) spéciale(s)**

Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires