

Catalogue des analyses - Laboratoire

IgE spécifiques mélange d'allergènes respiratoires

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dépistage allergique
Indication diagnostique	Affections allergiques
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Allergie
Synonyme	Pneumoallergènes
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999074 Lien 051 - Immunologie - Allergie

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'allergie

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 40 805

Site web

[Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu

1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode

- FEIA



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

32.4