Catalogue des analyses - Laboratoire

IgE totales

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Affections allergiques
Syndrome hyper-IgE

Renseignement téléphonique 021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 2x/semaine

Analyse accréditée

Spécialité • Allergie

Synonyme Immunoglobulines

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999074 **Lien**

<u>051 - Immunologie - Allergie</u>

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité ¹

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des protéines sériques



analyses

Matériel pédiatrique

1 Quantité

Tube 1.2 ml sérum **Contenant**



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Matériel néonatologie

1 Quantité

Tube 1.2 ml sérum **Contenant**



Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,

S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant envoi

Nuit et we Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	

• FEIA



Principe de la méthode

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

