

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# IgE spécifique

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Dépistage allergique
<b>Indication diagnostique</b>	Affections allergiques
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	2x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Allergie</li></ul>
<b>Synonyme</b>	CAP
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999074 <b>Lien</b> <a href="#">051 – Immunologie – Allergie</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'allergie

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

### Matériel néonatalogie

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

<b>Conservation</b>	4°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	T° ambiante
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaires d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Immunologie et allergie</u></a>

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • FEIA

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 32.4