



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Beta-2 microglobuline

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 31 40 805

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Protéines

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

999073

Lien

[050 - Immunologie](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des protéines  
sériques

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998994

## Stabilité maximale avant envoi

### Réfrigéré

Nuit et we

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,  
vol minimum 0.6 ml

### Conservation

4°C

### Conditions d'acheminement

T° ambiante

### Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
<b>Site web</b>	<a href="#">Immunologie et allergie</a>

## Résultats

**Délai de rendu** < 1 semaine

## Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Turbidimétrie

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 13.3