



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Facteur rhumatoïde

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auto-immunité</li></ul>

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999073 <b>Lien</b> <a href="#">050 - Immunologie</a>
------------------------------	---

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

### Stabilité maximale avant analyse

**Réfrigéré**

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante

### Acheminement

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
<b>Site web</b>	<a href="#">Immunologie et allergie</a>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 1 semaine
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbidimétrie</li> </ul>
<b>Technique</b>	La méthode est conçue pour détecter les IgM. D'autres classes d'immunoglobulines de facteur rhumatoïde ne seront dès lors pas détectées.



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 67