Catalogue des analyses - Laboratoire

Chaines légères kappa et lambda

Urine 24 h

Informations générales

Exa	m	ρ	n
CAU		•	

But de l'analyse	Recherche / suivi gammapathie monoclonale
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Protéines
Synonyme	Bence Jones, chaine kappa-lambda
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien <u>050 - Immunologie</u>

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Urine de 24h
Instruction(s) particulière(s)	Mettre au frigo entre les mictions Boutille plastique col large rond 2000 ml
Matériel standard	
Quantité	2
Contenant	Tube 8.5 ml stérile pour urine





Monovette bouchon jaune - N° commande : 949420

Matériel pédiatrique

Quantité ¹

Contenant Tube 8.5 ml stérile pour urine

Monovette bouchon jaune - N° commande : 949420

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 4°C

Conditions d'acheminementT° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Turbidimétrie
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	6 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	66.6



Tarif (CHF)