Catalogue des analyses - Laboratoire



Sang



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée

• Protéines

Synonyme Immunoglobulines

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999073

Lien

050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Section 10.7 mg

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres

analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des protéines sériques

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 1.2 ml sérum





S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2.0 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Turbidimétrie
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	6 mois
Tarif	

5.6



Tarif (CHF)