Catalogue des analyses - Laboratoire

# HIV-1

Virémie par PCR quantitative

## Informations générales

### Examen

But de l'analyse	Suivi HIV
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, "staging" de la maladie
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	3x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Virologie
Synonyme	VIH
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie

## Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml EDTA-K






Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K

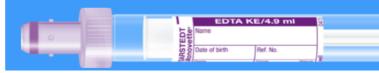

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

### Matériel néonatologie

**Quantité** 

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

#### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**Si acheminement impossible dans les 24 heures post-prélèvement

Centrifuger durant 15 min à 1000g

Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml

Conservation

L'échantillon à 4°C
le plasma à -20°C

**Conditions d'acheminement**L'échantillon à température ambiante

le plasma congelé

**Acheminement** 

**Conditions d'acheminement**Réception du matériel dans les 24 heures post prélèvement.

Le vendre di et les veilles de javes fériés grant 15 hon en plus tand

Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard.



Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



## **Analytique**

## **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	Immunologie et allergie
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Astreinte	021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites-HIV
Site web	<u>Immunologie et allergie - HIV</u>
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine

• RT-PCR

# Post analytique

Principe de la méthode

Méthode analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

