

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hépatite B

Virémie par PCR quantitative

Informations générales

Examen

| | |
|-----------------------------------|---|
| But de l'analyse | Suivi hépatite B |
| Indication diagnostique | Hépatites aiguës, hépatites chroniques, suivi thérapeutique |
| Renseignement téléphonique | 021 31 40 805 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | <ul style="list-style-type: none">• Virologie |
| Synonyme | HBV |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie |

Pré analytique

| | |
|--------------------------|--|
| Prélèvement | |
| Nature | <ul style="list-style-type: none">• Sang veineux |
| Matériel standard | |
| Quantité | 1 |
| Contenant | Tube 7.5 ml EDTA-K |



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si acheminement impossible dans les 24 heures post-prélèvement
Centrifuger durant 15 min à 1000g
Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml

Conservation

L'échantillon à 4°C
le plasma à -20°C

Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante
le plasma congelé

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel dans les 24 heures post prélèvement. Le
vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

Immunologie et allergie

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 40 805

Astreinte

021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV

Site web[Immunologie et allergie - HIV](#)**Résultats****Délai de rendu**

1 semaine

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- RT-PCR



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 119.7