



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Hépatite B

Virémie par PCR quantitative

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Suivi hépatite B
<b>Indication diagnostique</b>	Hépatites aigües, hépatites chroniques, suivi thérapeutique
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Virologie</li></ul>
<b>Synonyme</b>	HBV
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999073 <b>Lien</b> <u><a href="#">050 - Immunologie</a></u>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sang veineux</li></ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010


### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 4.9 ml EDTA-K

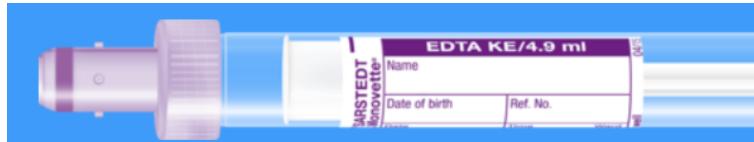

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré**

Nuit

### Traitements du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**

Si acheminement impossible dans les 24 heures post-prélèvement  
Centrifuger durant 15 min à 1000g  
Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml

**Conservation**

L'échantillon à 4°C  
le plasma à -20°C

**Conditions d'acheminement**

L'échantillon à température ambiante  
le plasma congelé

### Acheminement

**Conditions d'acheminement**

Réception du matériel dans les 24 heures post prélèvement. Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** Immunologie et allergie

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Astreinte** 021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites-HIV

**Site web** [Immunologie et allergie - HIV](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- RT-PCR



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 119.7