



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Hépatite C

Virémie par PCR quantitative

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Suivi hépatite C
<b>Indication diagnostique</b>	Hépatites aigües, hépatites chroniques, suivi thérapeutique
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Virologie</li></ul>
<b>Synonyme</b>	HCV
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	Numéro de commande 999073 Lien <u>050 - Immunologie</u>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sang veineux</li></ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

## Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
-----------------	---

<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml EDTA-K

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

## Stabilité maximale avant envoi

<b>Réfrigéré</b>	Nuit
------------------	------

## Traitements du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Si acheminement impossible dans les 24 heures post-prélèvement Centrifuger durant 15 min à 1000g Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml
--------------------	--

<b>Conservation</b>	L'échantillon à 4°C le plasma à -20°C
---------------------	--

<b>Conditions d'acheminement</b>	L'échantillon à température ambiante le plasma congelé
----------------------------------	---

<b>Acheminement</b>	
---------------------	--

<b>Conditions d'acheminement</b>	Réception du matériel dans les 24 heures post prélèvement. Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard.
----------------------------------	--

<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
--------------------------------	----------------------------

<b>Site</b>	BH18-100
-------------	----------

<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
----------------	----------------------------

<b>Pneumatique</b>	439
--------------------	-----

<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30
--	--



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** Immunologie et allergie

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Astreinte** 021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites-HIV

**Site web** [Immunologie et allergie - HIV](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- RT-PCR



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 119.7