

Catalogue des analyses - Laboratoire

VEGF-D

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Lymphangioliomyomatose (LAM)
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/mois
Analyse accréditée	NON

Prescription


Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie
------------------------------	---

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> • Sang veineux
---------------	--

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant analyse

Congelé

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si acheminement impossible dans les 24h post-prélèvement, centrifuger durant 15 min à 1000g, décanter le sérum. Volume minimal 600ul.

Conservation

L'échantillon à 4°C. le sérum à -20°C.

Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante, le sérum congelé.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel dans les 24 heures post-prélèvement. Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie

Résultats

Délai de rendu < 1 mois

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 78.3