Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00457

V13 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Pérampanel

Sang



Informations générales

_				
	_	-	-	-
гχ	а	m	ρ	п

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacocinétique de taux sanguin de pérampanel (absence d'intervalle de référence, évaluation seulement de la plausibilité du taux)
Indication diagnostique	Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) du dosage n'est actuellement pas validée.
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Fycompa
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique

Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique

Pré analytique

Prélèvement

Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Délai de prélèvement: juste avant la dose suivante Délai d'équilibration: 19 jours à posologie constante
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant Microtube 0.3 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Contenant(s) autre(s) Microtube 0.3 ml sérum sans gel

Volume minimumMicrotube bien rempli.

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

48h

Réfrigéré

48h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation

A T°amb : Sang

complet ou plasma max 48h jusqu'à

réception au laboratoire.

Plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Congelé

Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours

fériés jusqu'à 15h00.

Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma



PP:439

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Interprétation	Jours ouvrables et prélèvement reçu avant 13h.
Méthode analytique Principe de la méthode	• LC-MS/MS
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	6 jours
Aliquote congelé	2 semaines



Tarif

Tarif (CHF)

Prestation Tarmed

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

126