Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00460

V14 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Topiramate

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de topiramate (intervalle de référence disponible)
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse, étude
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Topamax
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique



Pré analytique

Prélèvement

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)


Délai de prélèvement: juste avant la dose suivante (minimum 6h post-

Délai d'équilibration: 4-5 jours à posologie constante

Matériel standard

1 Quantité

Tube 4.9 ml EDTA-K **Contenant**

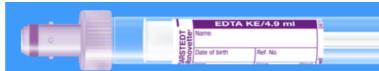

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

1 Quantité

Microtube 0.3 ml EDTA-K **Contenant**

Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Microtube 0.3 ml sérum sans gel Contenant(s) autre(s)

Microtube bien rempli. **Volume minimum**

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

48h **Ambiant**

48h Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le **Préparation**

plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.



Conservation	A T°amb : Sang complet ou plasma max 48h jusqu'à réception au laboratoire. Sinon congeler le plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -	-20°C
Conditions d'acheminement	Congelé Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi or fériés jusqu'à 15h00. Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et cong PP:439	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé	
Téléphone	021 31 44 271	
Résultats		
5/1.1	e a ch	
Délai de rendu	< 24h	
Interprétation	Jours ouvrables et prélèvement reçu avant 13h.	
Interprétation		
Interprétation Méthode analytique	Jours ouvrables et prélèvement reçu avant 13h.	
Interprétation Méthode analytique Principe de la méthode	Jours ouvrables et prélèvement reçu avant 13h.	

•	
Aliquote congelé	2 semaines
Tarif	
Tarif (CHF)	126
	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par péri
Prestation Tarmed	Si interpretation pharmacologique: 3.00 Chr par peri

