

Catalogue des analyses - Laboratoire

Topiramate

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de topiramate (intervalle de référence disponible)

Indication diagnostique

Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse, étude

Renseignement téléphoniqueLaboratoire: 021 314 42 71
Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/jour

Spécialité

- Dosages de médicaments

Synonyme

Topamax

Prescription**Formulaire de demande****Numéro de commande****Info**Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk
BH 18-100, tél 44 280**Lien**[017 - Pharmacologie - Nouveaux anti-épileptiques](#)**Renseignements à fournir**

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: juste avant la dose suivante (minimum 6h post-dose)

Délai d'équilibration: 4-5 jours à posologie constante

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml EDTA-K

Volume minimum

Microtube bien rempli.

Si cumul d'examen: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

48h

Réfrigéré

48h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation

A T°amb : **Sang complet** ou **plasma** max **48h** jusqu'à



réception au laboratoire.
Sinon congeler le plasma.

Conditions d'acheminement

Congelé

Acheminement**Conditions d'acheminement**

Si dépassement des délais de stabilité :
envoi du plasma congelé.
PP 439.
Urgence: par porteur + nous contacter

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacologie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
BH18-218
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 44 271

Résultats

Délai de rendu < 24h

Interprétation Jours ouvrables et prélèvement reçu avant 13h.

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 6 jours

Aliquote congelé 2 semaines

Tarif

Tarif (CHF) 126

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min