



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Topiramate

Sang

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de topiramate.

**Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique.**

---

#### Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71

Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00

---

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

---

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

---

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Exécution les mercredis et vendredis (si tube reçu dans notre laboratoire avant 11h00). Rendus de résultats le jour-même. Sous réserve de modification.

---

#### Analyse accréditée

OUI

---

#### Spécialité

- Dosages de médicaments

---

#### Synonyme

Topamax

### Prescription

#### Formulaire de demande

**Numéro de commande**

**Info**



Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH  
18-100, tél 44 280

**Lien**

[016 - Pharmacologie clinique](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	<p>Délai de prélèvement: juste avant la dose suivante (minimum 6h post-dose)</p> <p>Délai d'équilibration: 4-5 jours à posologie constante</p>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 4.9 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013</p>
<b>Contenant(s) autre(s)</b>	Tube 4.9 ml sérum sans gel
<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo
<b>Matériel pédiatrique</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Microtube 0.3 ml EDTA-K</p>  <p>Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434</p>
<b>Contenant(s) autre(s)</b>	Microtube 0.3 ml sérum sans gel
<b>Volume minimum</b>	<p>Microtube bien rempli.</p> <p>Si cumul d'examen: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)</p>
<b>Stabilité maximale avant analyse</b>	
<b>Ambiant</b>	72h
<b>Réfrigéré</b>	72h
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Préparation</b>	Si les stabilités ne peuvent pas être respectées:



Centrifuger (minimum 2000g, 10min, idéalement à 4°C) et décanter sans délai le plasma (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

---

**Conservation**

A T° ambiante ou réfrigéré: sang complet ou plasma 72h jusqu'à réception au laboratoire.  
A défaut, congeler le plasma: idéalement à -80°C, sinon à -20°C.

---

**Conditions d'acheminement**

Acheminement si possible congelé  
Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés

**Acheminement**

---

**Conditions d'acheminement**

Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00.  
Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma  
PP439 Urgence: par porteur + nous contacter

---

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

---

**Site**

BH18-100

---

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Pneumatique**

439

---

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

---

**Téléphone**

021 31 44 280

---

**Site web**

Réception des laboratoires 24/24.



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de pharmacologie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 44 271

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 24h
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LC-MS/MS</li></ul>

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	6 jours
<b>Aliquote congelé</b>	2 semaines
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	126
<b>Prestation Tarmed</b>	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min