



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Ciprofloxacin

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 314 42 80

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Spécialité

- Externalisé

#### Synonyme

Ciproxine®

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[USZ - IKC3 Toxicologie](#)

#### Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Avant d'administrer la dose suivante

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 998991


#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium

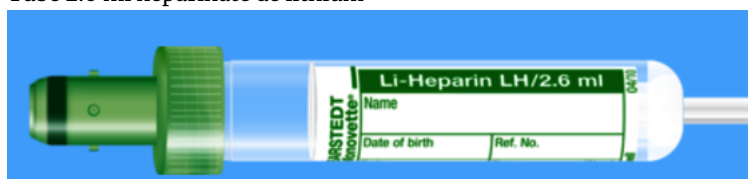

Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 999007

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conditions d'acheminement

Congelé

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

---

**Téléphone**

021 31 44 280

---

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)