Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Penicilline G**

Sang

## Information(s) importante(s)

**Attention** 

• Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

# Informations générales

**Examen** 

But de l'analyse	Dosage anti-infectieux
Renseignement téléphonique	021 31 44 280
Spécialité	• Externalisé
Synonyme	EXTENCILLINE

**Prescription** 

Formulaire de demande	Numéro de commande Lien PARIS-ST-JOSEPH-DOSAGES-DES-ANTI-INFECTIEUX
Renseignements à fournir	Pour évaluer l'efficacité et/ou un sous-dosage ou surdosage: 1) pour une administration en discontinu, prélever un résiduel dans les 30 min avant injection (Pic non contributif). 2) pour une administration en continu: prélèvement sans contrainte horaire (hors veine de perfusion).

### Pré analytique

**Prélèvement** 


• Sang veineux

Matériel standard

**Quantité** 

**Contenant** Tube 4.9 ml héparinate de lithium



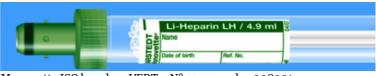

Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml EDTA

1

Matériel pédiatrique

Quantité

**Contenant** 

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Plasma (EDTA ou hépariné) centrifugé et décanté dans les 8h après le

prélèvement, congelé à  $-80\,^{\circ}\mathrm{C}$  et acheminement dans de la carboglace.

**Acheminement** 

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

