

Catalogue des analyses - Laboratoire

Penicilline G

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen**But de l'analyse** Dosage anti-infectieux**Renseignement téléphonique** 021 31 44 280**Spécialité**

- Externalisé

Synonyme EXTENCILLINE**Prescription****Formulaire de demande** **Numéro de commande**
Lien
[PARIS-ST-JOSEPH-DOSAGES-DES-ANTI-INFECTIEUX](#)**Renseignements à fournir** Pour évaluer l'efficacité et/ou un sous-dosage ou surdosage:
1) pour une administration en discontinu, prélever un résiduel dans les 30 min avant injection (Pic non contributif).
2) pour une administration en continu: prélèvement sans contrainte horaire (hors veine de perfusion).

Pré analytique

Prélèvement**Nature**

- Sang veineux

Matériel standard**Quantité** 1**Contenant** Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml EDTA


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium

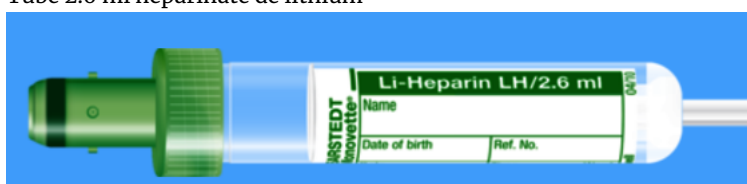

Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Plasma (EDTA ou hépariné) centrifugé et décanté dans les 8h après le prélèvement, congelé à -80°C et acheminement dans de la carboglace.

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)