Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Posaconazole**

Sang



## Informations générales

<b>Examen</b>
CAGIIICII

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de posaconazole (intervalle de référence disponible)
Indication diagnostique	TDM uniquement dans des cas spécifiques (i.e. difficultés d'adaptation des doses, épuration extrarénale, dialyse, interactions médicamenteuses, toxicité, résistances)
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Noxafil®
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique

## Pré analytique

## **Prélèvement**

Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Délai de prélèvement: juste avant la dose suivante Délai d'équilibration (steady-state): 5-7 jours à posologie constante
Matériel standard	
Contenant	Tube 4.9 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

## Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

## Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

### Matériel pédiatrique

Quantité

Microtube 0.3 ml EDTA-K

Contenant

1

Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Contenant(s) autre(s) Microtube 0.3 ml sérum sans gel

**Volume minimum** Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

labo (44 271)

#### Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 48h

Réfrigéré 48h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le **Préparation** plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant. Plasma: max 72 h à 4°C, autrement congelé: Idéalement à -80°C, sinon Conservation à -20°C Congelé **Conditions d'acheminement** Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés **Acheminement** Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours Conditions d'acheminement fériés jusqu'à 15h00. Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma PP:439 Réception des laboratoires Dépose des prélèvements



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	

Laboratoire de pharmacologie clinique

## Allalytique

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Interprétation	Mardi (prélèvements reçus avant lundi 13h) Vendredi (prélèvements reçus avant jeudi 13h)
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• LC-MS/MS



## Post analytique

## Conservation après examens

Prélèvement primaire	<6h
Aliquote congelé	<2 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	144
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

