Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00508

V15 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Nilotinib

Sang



Informations générales

Eva	m	^	n
CXd		_	

But de l'analyse	Dosage du taux sanguin de nilotinib
Indication diagnostique	Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) ou pharmacocinétique des dosage n'est actuellement pas validée.
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Tasigna®
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement posologique si<30j)
Duá apalutiana	

Pré analytique

Prélèvement

Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 6h post-dose) Délai d'équilibration: dès 1 semaine à poslogie constante
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Contenant(s) autre(s)

Sérum sans gel 4.9 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K

Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

1

Contenant(s) autre(s) Microtube 0.3 ml sérum sans gel

Volume minimum Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

labo (44 271)

Matériel néonatologie

Contenant(s) autre(s)Serum sans gel 2.6ml

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 72h

Réfrigéré 72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le

plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation A T°amb : Sang

complet ou plasma max 72h jusqu'à

réception au laboratoire.

Sinon congeler le plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés

Acheminement

Conditions d'acheminementRéception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours

fériés jusqu'à 15h00.



Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma PP:439

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Interprétation	<48h dès résultat
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• HPLC-MS/MS



Principe de la méthode

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	6 jours
Aliquote congelé	2 semaines
Tarif	
Tarif (CHF)	126
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

