



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Sorafenib

Sang

## Information(s) importante(s)

**Attention** • Contact nécessaire avant réalisation

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Dosage du taux sanguin de sorafenib.  
**Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique.**

**Renseignement téléphonique** Laboratoire: 021 314 42 71  
Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution** 1x/semaine

**Fréquence et/ou horaire d'exécution** Exécution mardis (si tube reçu au laboratoire avant midi), rendu de résultats les mercredis. Sous réserve de modification.

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Dosages de médicaments



**Synonyme** Nexavar®

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
**Info**  
Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH  
18-100, tél 44 280  
**Lien**  
[016 - Pharmacologie clinique](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	<p>Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 6h post-dose) Délai d'équilibration: dès 1 semaine à poslogie constante</p>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 4.9 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013</p>
<b>Contenant(s) autre(s)</b>	Serum sans gel 4.9 ml
<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo
<b>Matériel pédiatrique</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Microtube 0.5 ml EDTA-K</p>  <p>Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434</p>
<b>Contenant(s) autre(s)</b>	Microtube 0.3 ml sérum sans gel
<b>Volume minimum</b>	Si cumul d'exams: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)
<b>Stabilité maximale avant analyse</b>	
<b>Ambiant</b>	72h
<b>Réfrigéré</b>	72h
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Préparation</b>	<p>Si les stabilities ne peuvent pas être respectées: Centrifuger (minimum 2000g, 10min, idéalement à 4°C) et décanter sans délai le plasma (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.</p>



<b>Conservation</b>	A T° ambiante ou réfrigéré: sang complet ou plasma 72h jusqu'à réception au laboratoire. A défaut, congeler le plasma: idéalement à -80°C, sinon à -20°C.
<b>Conditions d'acheminement</b>	Acheminement si possible congelé Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés.
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00. Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma PP439 Urgence: par porteur + nous contacter
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires 24/24.</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de pharmacologie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 44 271

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	1 semaine
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• HPLC-MS/MS</li></ul>

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	6 jours
<b>Aliquote congelé</b>	2 semaines
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	126
<b>Prestation Tarmed</b>	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min