



Catalogue des analyses - Laboratoire

Sorafenib

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage du taux sanguin de sorafenib

Indication diagnostique

Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) ou pharmacocinétique des dosage n'est actuellement pas validée.

Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71
Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Spécialité

- Dosages de médicaments

Synonyme

Nexavar®

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH
18-100, tél 44 280

Lien

[016 - Pharmacologie clinique](#)

Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement posologique si < 30j)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 6h post-dose)
Délai d'équilibration: dès 1 semaine à posologie constante


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K

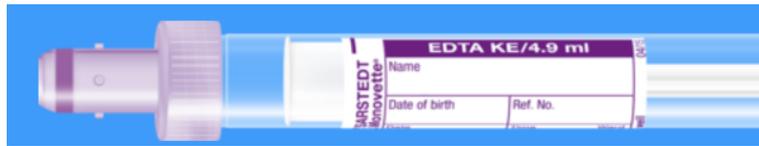

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Contenant(s) autre(s)

Serum sans gel 4.9 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml sérum sans gel

Volume minimum

Si cumul d'exams: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

72h

Réfrigéré

72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter **sans délai** le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation

A T°amb : **Sang complet** ou **plasma** max **72h** jusqu'à réception au laboratoire.
Sinon congeler le plasma:Idéalement à -80°C, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Congelé
Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00.
Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma
PP:439

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique**

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de pharmacologie clinique

Site

BH18-100

AdresseRue du Bugnon 46
BH18-218
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 44 271

Résultats**Interprétation**

<48h dès résultat

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- HPLC-MS/MS



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 6 jours

Aliquote congelé 2 semaines

Tarif

Tarif (CHF) 126

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min