



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Dolutegravir

Sang

## Information(s) importante(s)

### Attention

- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

## Informations générales

### Examen

### But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de dolutegravir (intervalle de référence disponible)

### Indication diagnostique

Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse, étude

### Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71  
Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04

### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

### Fréquence d'exécution

1x/semaine

### Spécialité

- Dosages de médicaments

### Synonyme

Tivicay®, dans Triumeq®

### Prescription

### Formulaire de demande

#### Numéro de commande

#### Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280

#### Lien

[016 - Pharmacologie clinique](#)

### Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement posologique si <30j)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 4-5h post-dose)  
Délai d'équilibration: dès 2 semaines à posologie constante

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

#### Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

#### Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml sérum sans gel

#### Volume minimum

Si cumul d'examen: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

24h

#### Réfrigéré

48h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et **décanter sans délai** le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

#### Conservation

Plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C



---

**Conditions d'acheminement**

Congelé  
Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés  
Recommandations d'envoi matériel HIV

**Acheminement****Conditions d'acheminement**

Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00.  
Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma  
PP:439

---

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

---

**Site**

BH18-100

---

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Pneumatique**

439

---

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

---

**Téléphone**

021 31 44 280

---

**Site web**

Réception des laboratoires 24/24.

## Analytique

### Prestataire

#### Prestataire

Laboratoire de pharmacologie clinique

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Rue du Bugnon 46  
BH18-218  
1011 Lausanne

#### Tube pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

#### Téléphone

021 31 44 271

### Résultats

#### Interprétation

<48h dès résultat

#### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- HPLC-MS/MS

## Post analytique

### Conservation après examens

#### Prélèvement primaire

6 jours

#### Aliquote congelé

2 semaines

#### Tarif

#### Tarif (CHF)

144

#### Prestation Tarmed

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min