



Catalogue des analyses - Laboratoire

Elvitegravir

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin d'elvitegravir.
Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique.

Renseignement téléphonique

Laboratoire: 021 314 42 71
Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Exécution mardis (si tube reçu au laboratoire avant lundi 17h00),
rendu de résultats les mercredis. Sous réserve de modification.

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Stribild®, dans Genvoya®

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH
18-100, tél 44 280

Lien

[016 - Pharmacologie clinique](#)

Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 4-5h post-dose)
Délai d'équilibration: dès 2 semaines à posologie constante


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K

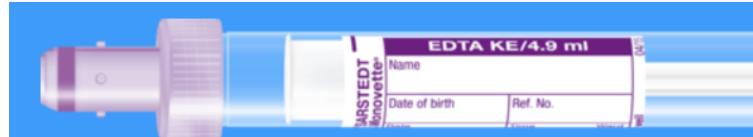

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Contenant(s) autre(s) Tube 4.9 ml sérum sans gel

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Contenant(s) autre(s) Microtube 0.3 ml sérum sans gel

Volume minimum Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

Réfrigéré 48h

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation Si les stabilités ne peuvent pas être respectées:
Centrifuger (minimum 2000g, 10min, idéalement à 4°C) et décanter sans délai le plasma (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation A T°ambiante: sang complet 24h et plasma 48h jusqu'à réception au laboratoire.
Réfrigéré: sang complet 72h et plasma 48h jusqu'à réception au laboratoire.
A défaut, congeler le plasma: idéalement à -80°C, sinon à -20°C.

Conditions d'acheminement Acheminement si possible congelé
Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés
Recommandations d'envoi matériel HIV

Acheminement

Conditions d'acheminement Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours fériés jusqu'à 15h00.
Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma

PP439 Urgence: par porteur + nous contacter



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de pharmacologie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
BH18-218
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 44 271

Résultats

Délai de rendu

1 semaine



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 6 jours

Aliquote congelé 1 mois

Tarif

Tarif (CHF) 144

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min