Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Elvitegravir**

Sang



# Information(s) importante(s)

### **Attention**

- Condition particulière d'acheminement
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

# Informations générales

_				
┗↘	73	m	Δ	n
	(a)		_	

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin d'elvitegravir (intervalle de référence disponible)
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse, étude
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Stribild®, dans Genvoya®
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement posologique si<30j)



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

• Sang veineux


**Instruction(s) particulière(s)**Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 4-5h post-dose)

Délai d'équilibration: dès 2 semaines à posologie constante

**Matériel standard** 

**Quantité** 

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K

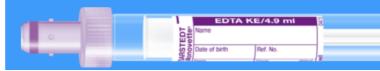

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

1

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K

Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Contenant(s) autre(s) Microtube 0.3 ml sérum sans gel

**Volume minimum** Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

Réfrigéré 48h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le

plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.



Conservation	Plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C	
Conditions d'acheminement	Congelé Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés Recommandations d'envoi matériel HIV	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi or fériés jusqu'à 15h00. Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et cong PP:439	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



# **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Interprétation	<48h dès résultat
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• HPLC-MS/MS
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	6 jours
Aliquote congelé	2 semaines
Tarif	
Tarif (CHF)	144
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 m

